

Spritzen für Anwendungen bei Pferden

Einzel- und Mehrfachdosislösungen



Mit Dial-A-Dose und Posi-Dose Spritzen können Anwender die genaue Dosiermenge wählen



Posi-Dose ist für oral verabreichte Entwurmungsmittel konzipiert



Erhältlich in Ausführungen für Einzel- und Mehrfachdosen

Nordson EFD bietet eine umfangreiche Auswahl an Dosierspritzen zur Behandlung von Pferden und anderen Tieren an.

Die Einwegspritzen von EFD für Tierarzneimittel sind für Einzel- und Mehrfachdosisanwendungen erhältlich und werden zum Verpacken von Medikamenten, Ergänzungsmitteln und einer Vielzahl von weiteren Cremes, Gelen und Pasten für Pferde eingesetzt.

Für die Mehrfachdosierung bieten die EFD Dial-A-Dose® Spritzen eine innovative, anpassbare Lösung zur individuellen Abstimmung der Dosen auf Tiergröße, Behandlungsplan und andere Anforderungen. Mit dem in das System integrierten Ring können die Anwender die korrekte Dosis einstellen, verabreichen und die Spritze danach bis zum nächsten Einsatz wieder sicher abdichten.

Das Posi-Dose® System von EFD ist für orale Entwurmungsbehandlungen konzipiert. Ihr einzigartiger Twistlock-Ring rastet ein und gibt die genaue Dosiermenge vor. Die Bauweise ohne Düse sorgt dafür, dass jede Dosis vollständig abgegeben wird. Für Mehrfachdosierungen können Posi-Dose Spritzen wieder abgedichtet werden.

Andere einteilige und zweiteilige Kolben ohne den Rastmechanismus sind ebenfalls erhältlich.

Dial-A-Dose und Posi-Dose Spritzen dienen als sichere Verpackung von Tierarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte für Rinder. Sie sind in den Größen 6cc bis 100cc erhältlich.

Eigenschaften

- Verschiedene Größen, Farben und Düsen
- Selbstentlüftende Kartuschen mit „Einführhilfe“ zur einfachen Befüllung

Vorteile

- Dial-A-Dose und Posi-Dose ermöglicht Tierärzten oder Besitzern das Verabreichen der Dosis an ein Pferd, das Abdichten der Spritze und Bereithalten für die nächste Dosis
- Der Verschlussring garantiert die Abgabe einer genauen Menge
- Schnellere und einfachere Wiederholung der Dosierung als bei anderen Spritzen
- Unterschiedliche Düsen zur leichteren Abgabe von Substanzen jeder Viskosität für orale und topische Anwendungen



Für weitere Informationen

Spritzensysteme für Anwendungen bei Pferden

SPRITZENSYSTEME FÜR PFERDE

Spritzen mit integrierter Formdüse. Kolben und Kappen bitte separat bestellen. Weiße Kappen aus LDPE.

Düsentyp: Standard Oral 3/16" ID x 1-13/32" Länge

Artikel-Nr.	Größe	Material	Farbe	Kappe	Kolben für Mehrfachdosis		Optionen für Einzeldosiskolben	
					Dial-A-Dose	Einteilig	Zweiteilig	
7660313	15 cm ³	PE	Weiß	7660198	7660343	7660329	7660333	
7660399	32 cm ³	PE	Weiß	7660198	7660452	—	7660436	
7660571	100 cm ³	PP	Transparent	7660198	7660580	—	7660581	

Düsentyp: Posi-Dose 25/64" ID

Artikel-Nr.	Größe	Material	Farbe	Kappe	Dial-A-Dose	Einteilig	Zweiteilig
7660282*	6 cm ³	PE	Weiß	7660206	—	—	—

Düsentyp: Medium Oral 9/32" ID x 1-13/32" Länge

Artikel-Nr.	Größe	Material	Farbe	Kappe	Dial-A-Dose	Einteilig	Zweiteilig
7660419	32 cm ³	PE	Weiß	7660207	7660452	—	7660436
7660482	34 cm ³	PE	Weiß	7660207	7660452	—	7660436

Düsentyp: Breit Oral 13/32" ID x 1-5/16" Länge

Artikel-Nr.	Größe	Material	Farbe	Kappe	Dial-A-Dose	Einteilig	Zweiteilig
7660522	60 cm ³	PE	Weiß	7660191	7660538	—	7660528
7660553	80 cm ³	PE	Weiß	7660191	—	—	7660938
7660572	100 cm ³	PE	Weiß	7660191	7660580	—	7660581


*Note: Posi-Dose plunger included with syringe.

Standard Kolben für Mehrfachdosis


Wählen Sie den Dial-A-Dose oder Posi-Dose Kolben für einstellbare Mehrfachdosis. Beispielhafte Markierungen für die Kalibrierung eines Kolbens, siehe unten. Farben und Kalibrierung können kundenspezifisch ausgewählt werden.



6 cm³ Posi-Dose Kolben

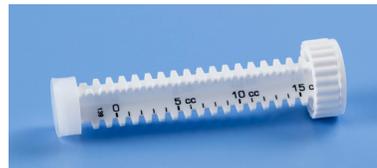

15 cm³ Dial-A-Dose Kolben

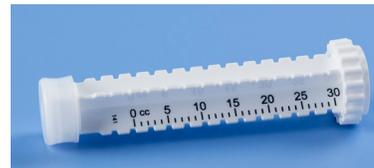

30 cm³ Dial-A-Dose Kolben



60 cm³ Dial-A-Dose Kolben



80 cm³ Dial-A-Dose Kolben



100 cm³ Dial-A-Dose Kolben

Standard Ein- und Zweiteiliger Kolben

Wählen Sie einen einteiligen oder zweiteiligen Kolben für die Abmessung Ihrer Dosis. Einteilige Kolben haben integrierte Dichtungen, zweiteilige Kolben erlauben eine höhere Flexibilität bei unterschiedlichen Medien. Beide Arten vermeiden tropfen und auslaufen und verbessern die Produktanwendung.



Einteilig Kolben



Zweiteilig Kolben



EFD

Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder gehen auf www.nordsonefd.com/de.

Deutschland/Österreich

+49 89 2000 338 600; info.de@nordsonefd.com

Schweiz

+41 (0) 81-723-4747; info.ch@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation 120224