

Seringues Dial-A-Dose et Autres pour la Santé Animale

Produits mono et multi-doses pour animaux, grands et petits



Les seringues Dial-A-Dose permettent aux utilisateurs de définir la dose exacte.



Disponible en mono et multi-doses.



Choix d'embouts pour différents animaux.

Nordson EFD propose une gamme complète de seringues doseuses utilisées dans le traitement des chevaux, des vaches et de nombreux autres animaux.

Disponibles en mono ou multi-dose, les seringues jetables Nordson EFD sont utilisées pour le conditionnement de médicaments, de compléments et d'une variété de crèmes, gels et pâtes.

Pour une utilisation multi-dose, les seringues Nordson EFD Dial-A-Dose® offrent une solution innovante et personnalisable pour adapter les doses en fonction de la taille des animaux, du planning de traitement et d'autres exigences. La bague intégrée du système permet aux utilisateurs de doser et d'administrer la bonne quantité, puis de refermer la seringue en toute sécurité jusqu'à la prochaine utilisation.

Le système Posi-Dose® de Nordson EFD est conçu pour les traitements vermifuges par voie orale. Sa bague de blocage unique se bloque en position afin de déterminer le volume de dose spécifique. Sa conception sans embout assure que chaque dose est complètement administrée.

Des plongeurs une pièce et deux pièces sans mécanisme de blocage sont également disponibles. En outre, de nombreuses seringues doubles DIY (Do-It-Yourself) peuvent également être utilisées pour les petits animaux. Consulter notre équipe technique pour plus de précision.

Les seringues Dial-A-Dose et Posi-Dose conditionnent en toute sécurité les produits pharmaceutiques vétérinaires, les compléments nutritionnels et autres produits bovins. Elles sont disponibles dans des volumes de 6cc à 100cc.

Caractéristiques

- Large gamme de tailles, de couleurs et d'embouts
- Seringues avec évent et une entrée légèrement agrandie pour faciliter le remplissage et l'insertion du plongeur

Avantages

- Dial-A-Dose et Posi-Dose permettent aux vétérinaires ou aux propriétaires d'administrer la dose nécessaire à l'animal, de reboucher la seringue et de la conserver pour la prochaine injection
- La bague de blocage garantit la dose exacte à administrer
- Répéter les doses est plus rapide et plus facile qu'avec d'autres seringues
- Plusieurs options d'embout pour administrer avec facilité des produits de viscosités variées et répondre aux applications orales, topiques, intra-mammaires et rectales



Plus d'infos

Nordson
EFD

Systèmes de Seringue Dial-A-Dose et Autres pour la Santé Animale

SYSTÈMES DE SERINGUE POUR ANIMAUX

Les seringues comportent un embout moulé intégré. Commander les plongeurs et les bouchons séparément. Bouchons blancs moulés en LDPE.

Type d'embout : Cône Mince, DI 1,59 mm x 26,8 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660277	6cc	PE	Blanc	7660197	—	7660292	—
	7022846	15cc	PE	Blanc	7660197	7660343	7660329	7660333

Type d'embout : Luer Lock, DI 1,6 mm x 6,35 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660392	32cc	PP	Ambre	7660276	7660752	7660727	7660736

Type d'embout : Oral Standard, DI 4,76 mm x 35,7 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660313	15cc	PE	Blanc	7660198	7660343	7660329	7660333
	7660399	32cc	PE	Blanc	7660198	7660752	7660727	7660736
	7660571	100cc	PP	Transparent	7660198	7660580	—	7660581

Type d'embout : B14, Posi-Dose, DI 9,92 mm

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660282*	6cc	PE	Blanc	7660206	—	—	—

*Note : Le piston Posi-Dose est inclus dans la seringue.

Type d'embout : Oral Médium, DI 7,14 mm x 35,7 mm de Long

						Options Plongeur Multi-dose	Options Plongeur Mono-dose	
	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660719	32cc	PE	Blanc	7660207	7660752	7660727	7660736
	7660782	37cc	PE	Blanc	7660207	7660752	7660727	7660736
	7660786	36cc	PE	Blanc	7660207	7660797	—	7660792

Type d'embout : Cône, DI 2,4 mm x 38,1 mm de Long

	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660371	30cc	PE	Blanc	7660201	—	7660380	—

Type d'embout : Oral Large, DI 10,32 mm x 33,3 mm de Long


	Réf.	Taille	Matériau	Couleur	Bouchon	Dial-A-Dose	Une Pièce	Deux Pièces
	7660522	60cc	PE	Blanc	7660191	7660538	—	7660528
	7660553	80cc	PE	Blanc	7660191	—	—	7660938
	7660572	100cc	PE	Blanc	7660191	7660580	—	7660581

Plongeurs Multi-Dose Standards


Choisir un plongeur Dial-A-Dose ou Posi-Dose pour une utilisation multi-dose mesurée. Exemples de graduation illustrés ci-dessous. Possibilité de personnaliser les couleurs et les graduations.




Plongeur Posi-Dose 6cc

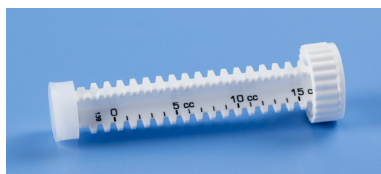


Plongeur Dial-A-Dose 15cc

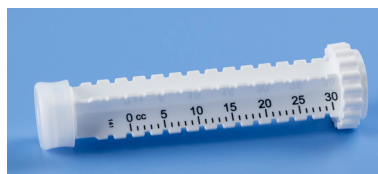


Plongeur Dial-A-Dose 30cc

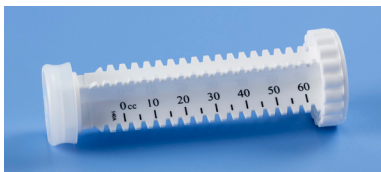

Plongeur Dial-A-Dose 60cc

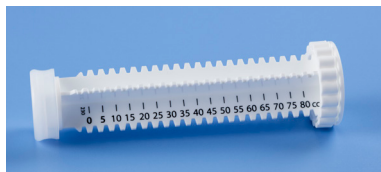

Plongeur Dial-A-Dose 80cc

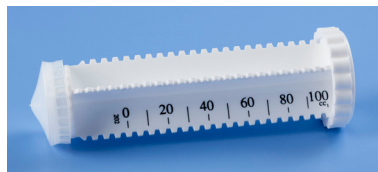

Plongeur Dial-A-Dose 100cc

Plongeurs Une et Deux Pièces Standards

Choisir un plongeur une ou deux pièces lorsqu'il n'est pas nécessaire de mesurer les doses. Les plongeurs une pièce sont intégralement moulés avec les joints, tandis que les plongeurs deux pièces permettent plus de flexibilité pour différents fluides. Les deux modèles sont facilement rétractables pour favoriser le rappel de goutte et maximiser l'utilisation du produit.



Plongeur une pièce



Plongeur deux pièces



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000

+33 (0) 1 30 82 68 69

EFDEU-South@nordson.com



Suisse

+41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux

00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

Canada

800-556-3484; canada@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2024 Nordson Corporation v120224